


# VETIS

Partner chovateľov

www.vetis.sk


NOVINKA 2024

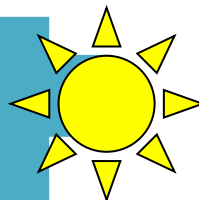

## Efektívna pomôcka sledovania pripúšťania plemeníc

Odporúčané použitie:

- Šesť týždňov predtým, ako začnete s pripúšťaním plemeníc,
- označte celú čriedu 1. farbou (červená).
- Otieraná farba signalizuje, že zviera je rujné. Rujné zvieratá sa po pripustení (rozotrená červená farba) označia s 2. farbou (modrá).
- Po šiestich týždňoch sa môže začať s kontrolou gravidity (nerozotrená modrá farba). Červeno označené zvieratá s nerozotretou farbou (ktoré nemajú žiadny cyklus), by sa mali prehliadnuť zverolekárom a v prípade potreby ošetriť.
- Všetky gravidné zvieratá sa označia s 3. farbou (zelená).
- Zvieratá, ktoré sú opakovane pripúšťané sa označia 4. farbou (oranžová).

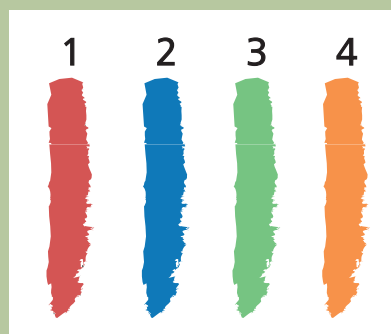

### Farba na označenie párenia s kefou Daisy Paint

• označovacia farba na báze vody na efektívne a cenovo výhodné označenie párenia kráv • zvyšuje úspech oplodnenia, redukuje vyradenie nepripustených zvierat a znižuje náklady na reprodukciu • farba nanosená na chvost sa otiera vzájomným skákaním a umožňuje ľahšie rozpoznanie páriacich sa zvierat • pomocou farebnej schémy sa môžu zvieratá podľa cyklu označovať rozdielne • patentovaná kefa Daisy Brush umožňuje nanosenie 5 cm širokého farebného pásu na koreň chvosta. Iba jedným ťahom • zahnutá kefa s flexibilnými štetinami sa optimálne prispôbi tvaru chvosta a naniesie farbu rovnomerne a zároveň úsporne .




- úspora farby až do 30 % v porovnaní s inými označovacími metódami
- zreteľne lepšia viditeľnosť ako pri bežných označovacích farbách
- dostupné v štyroch svietiacich farbách: červená, modrá, zelená a oranžová
- opatrené horčinou



Novinka

NEW




Kat. č.	Farba	Obsah	
20700	červená	750 ml / Flaša	1/12
20701	modrá	750 ml / Flaša	1/12
20702	zelená	750 ml / Flaša	1/12
20703	oranžová	750 ml / Flaša	1/12




www.vetis.sk

online 24 hodín/7 dní v týždni

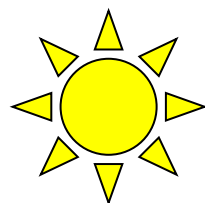

## Farba na označenie párenia Daisy Paint

- označovacia farba na báze vody na efektívne a cenovo výhodné označenie párenia kráv • zvyšuje úspech oplodnenia, redukuje vyradenie nepripustených zvierat a znižuje náklady na reprodukciu • farba nanosená na koreň chvosta sa otiera vzájomným skákaním a umožňuje ľahšie rozpoznanie páriacich sa zvierat • pomocou farebnej schémy sa môžu zvieratá podľa cyklu označovať rozdielne • opatrené horčinou • zreteľne lepšia viditeľnosť ako pri bežných označovacích farbách
- dostupné v štyroch svietiacich farbách: červená, modrá, zelená a oranžová • jednoduché nanosenie farby pomocou aplikátora tailpainter

Kat. č.	Farba	Obsah	
20704	červená	750 ml / Fľaša	1/12
20705	modrá	750 ml / Fľaša	1/12
20706	zelená	750 ml / Fľaša	1/12
20707	oranžová	750 ml / Fľaša	1/12
20708	červená	2,5 l / Kanister	1
20709	modrá	2,5 l / Kanister	1
20710	zelená	2,5 l / Kanister	1
20711	oranžová	2,5 l / Kanister	1
20712	červený	5 l / Kanister	1
20713	modrá	5 l / Kanister	1
20714	zelená	5 l / Kanister	1
20715	oranžová	5 l / Kanister	1



[www.vetis.sk](http://www.vetis.sk)

online 24 hodín/7 dní v týždni